

## Information

*always your partner*

## TECO<sup>®</sup>Fast Aspergillus IgG

IVD CE

## Antikörper Lateral Flow Assay

zur schnellen Diagnostik der chronisch kavitären pulmonaren Aspergillose (CCPA) und der allergisch-bronchopulmonalen Aspergillose (ABPA)

- Lateral Flow Assay auf Fluoreszenzbasis zur Auslesung am Reader
- Semiquantitativer Assay mit Berechnung des Konzentrationswertes in AU/ml
- Validiert für Serumproben
- Nach Verdünnung der Probe in 15 Minuten zum Ergebnis
- Klinische Sensitivität: 88,9% (n = 143)
- Klinische Spezifität: 91,3% (n = 143)
- Detektionslimit: 14 AU/ml, cut-off Wert von 135 AU/ml



## TECO®Fast Aspergillus IgG Antikörper LFA - Probenvorbereitung



Serumprobe 1:200 mit Verdünnungspuffer mischen und 10 Sekunden vortexen

## TECO®Fast Aspergillus IgG Antikörper LFA - Testablauf



100 µl verdünntes Serum auf Testkassette

Testkassette in den Analyzer einführen

Ergebnis in 15 Min. an:

- Drucker
- USB (.xls Datei)
- LIS
- Interner Speicher

TECO®Fast Aspergillus IgG Antikörper Assay  
Katalognummer: TE 1070

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
For further information please contact:  
Pour plus d'information, veuillez contacter:

[www.tecomedical.com](http://www.tecomedical.com)



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

**TECOmedical AG**

Gewerbestrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Germany

**TECOmedical GmbH**

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Austria

**TECOmedical AG**

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)